

LISTADO DE REQUISITOS PARA MUESTRAS

Código: L-POE 5.8

Rev: 01

Pág: 1 de 4

EXAMEN	TIPO DE MUESTRA	RECIPIENTE PARA RECOLECCION	CANTIDAD	TIEMPO PARA LLEGAR AL LABORATORIO
Exámenes serológicos: • Brucelosis • Leucosis bovina • Leptospirosis • DVB • <i>Neospora caninum</i> • Paratuberculosis • Toxoplasmosis • Anemia infecciosa Equina • Rinoneumonitis equina	Sangre	Tubo tapa ROJA (Sin Anticoagulante)	7 – 10 ml	1 – 2 horas (temperatura ambiente) Mayor a 2 horas (Refrigerar) * Máximo llevar las muestras al laboratorio en 24 horas (Refrigerada)
DVB Ag - PI	Sangre	Tubo tapa ROJA (Sin Anticoagulante) O Tubo tapa LILA (Con Anticoagulante EDTA)	7 – 10 ml 4 ml	1 – 2 horas (temperatura ambiente) Mayor a 2 horas (Refrigerar) * Máximo llevar las muestras al laboratorio en 24 horas (Refrigerada)
Brucelosis en Leche	Leche de Tanque o Individual	Frasco o tubo estériles	20 ml	Lo más pronto. Mantener en Refrigeración.

LISTADO DE REQUISITOS PARA MUESTRAS

Código: L-POE 5.8
Rev: 01
Pág: 2 de 4

EXAMEN	TIPO DE MUESTRA	RECIPIENTE PARA RECOLECCION	CANTIDAD	TIEMPO PARA LLEGAR AL LABORATORIO
IBR	Sangre	Tubo tapa ROJA (Sin Anticoagulante)	7 – 10 ml	1 – 2 Hrs (T° ambiente) > 2 hrs (Refrigerar)
	Leche	Frasco o tubo estériles	10 ml	* Max. Llevar las muestras al lab. en 24 hrs.
Química Sanguínea • Nitrógeno Ureico • Glucosa • Calcio • Fósforo • Magnesio • Sodio • Potasio • GGT • Bilirrubinas • TGO • TGP • Proteínas Totales • Creatinina • Albúmina	Sangre	Tubo tapa ROJA (Sin Anticoagulante)	7 – 10 ml	1 hora (T° ambiente) > 1 – 6 hrs (Refrigerar)

LISTADO DE REQUISITOS PARA MUESTRAS

Código: L-POE 5.8
Rev: 01
Pág: 3 de 4

EXAMEN	TIPO DE MUESTRA	RECIPIENTE PARA RECOLECCION	CANTIDAD	TIEMPO PARA LLEGAR AL LABORATORIO
NUL	Leche	Frasco estéril Cierre hermético	30 ml	Inmediatamente Mantenerla refrigerada hasta 24 hrs.
Biometría Hemática	Sangre	Tubo tapa LILA (Con Anticoagulante EDTA)	3 – 5 ml	Hasta 8 hrs (T° ambiente) 24 hrs (Refrigerar)
Cultivo y Antibiograma (Mastitis)	Leche del cuarto afectado o secreción de la ubre.	Frasco o tubo estériles	10 ml	En el menor tiempo posible. Mantenerla Refrigerada Congelada (Mayor tiempo)
Calidad de Leche	Leche de Tanque o Tarros	Frasco estéril Cierre hermético	80 ml	Inmediatamente (En el menor tiempo posible). Mantenerla Refrigerada
Antibióticos en leche	Leche	Frasco o tubo estériles	10 ml	Inmediatamente Mantenerla refrigerada hasta 24 hrs.

LISTADO DE REQUISITOS PARA MUESTRAS

Código: L-POE 5.8

Rev: 01

Pág: 4 de 4

EXAMEN	TIPO DE MUESTRA	RECIPIENTE PARA RECOLECCION	CANTIDAD	TIEMPO PARA LLEGAR AL LABORATORIO
Parásitos Gastrointestinales Parásitos Hepáticos Parásitos Pulmonares	Heces	Guante ginecológico de examinación	20gr – 40 gr	Inmediatamente (Menos de 4 horas) Mantenerla Refrigerada
Calidad de Agua	Agua del lugar a realizar el análisis	Frasco estéril Cierre hermético	120 ml	Inmediatamente (En el menor tiempo posible). Mantenerla Refrigerada